



Gebrauchsanleitung - Geschäftsbedingungen (Auszug)

2019

Medicovi - Wasserwellentherapie - Einlagen
sensomotorisch

Allgemeine Informationen

Orthopäd. sensomotorische Einlagen von Medicovi werden in Doppelgrößen gefertigt und können vorne mit der Schere bei Bedarf auf die richtige Länge gekürzt werden. Medicovi Einlagen fallen sehr klein aus. Bei einer normalen Größe von z.B. 38 bis 39 sollte man die Größe 40-41 bestellen. Bei einer Größe von 37 - 38 die Größe 38-39 und zur Sicherheit vorne auf jeden Fall ca.5-10 mm kürzen, damit die Druckentlastung immer zwischen Zehen und Ballen spürbar ist. Die Einlagen zuerst am rechten Fuss probieren weil das ganze Körpergewicht oft auf der rechten Seite lastet.

Medicovi Druckentlastungseinlagen beugen Druckbelastungen an den Füßen und Gelenken bei langem Stehen und Laufen vor - besonders beim Arbeiten auf harten Böden - zum Beispiel :

Ballenschmerzen - Fussbrennen - Fersensporn/Achillessehnenreizungen - Knie-Hüft, Schulter und Rückenschmerzen

Sensomotorische Einlagen können auch therapeutische Eigenschaften entwickeln, insbesondere bei Fehlstellungen an Hüften und Füßen, Entzündungen an Füßen und Gelenken - zum Beispiel

Fersensporn/Achillessehnenreizungen- Hallux Valgus, Rigidus - Ballenschmerzen - Hammerzehen - Arthrose etc.

Viele andere Eigenschaften der sensomotorischen Einlagen von Medicovi können Sie unter www.medicovi.de erfahren , oder unter Mailadresse : medicovi-gesundheitsprodukte@gmx.de erfragen.

Medicovi Einlagen passen sich selbst den Füßen an - passen daher in jeden Schuh - Schmerzen an Füßen und Gelenken werden beseitigt. Lästige Termine bei Ärzten und Orthopäden - Anträge in Betrieben - entfallen

Gebrauchszeit

Die *Gebrauchszeit* von Medicovi Einlagen richtet sich nach Einsatz und Gebrauch unter speziellen Bedingungen. Im Therapiebereich gelten kürzere Zeiten wie im normalen Bereich. Die Grundsubstanz Wasser in den Einlagen unterliegt äusseren Einflüssen und es kommt zu unterschiedlichen Tragezeiten

Eingewöhnung (1 - 14 Tage) in besonderen Fällen

Medicovisohlen erhöhen die Durchblutung und aktivieren Sehnen und Muskeln in Füßen und Beinen. Daher können anfangs leichte Muskelschmerzen hervorgerufen werden, bis ein entsprechender Trainingsstand erreicht wird. Durch die einseitige Druckbelastung auf die Füße, kann das Gefühl entstehen, dass eine Sohle weniger Wasser enthält. Dieses Gefühl relativiert sich für gewöhnlich nach kurzer Tragezeit

bei A 40 - T40 - S100 - keine Eingewöhnungszeit notwendig.

Pflege

Medicovisohlen (H20, Front und Twin heels) sind bei 40 ° waschbar
A40, T40 und T45 bitte nur wegen Beschichtung im Waschbecken waschen. Waschen fast jeden Tag möglich .

Auszug aus unseren Geschäftsbedingungen

auch unter www.medicovi.de

Bedingungen bei Messekäufen (Geschäftsräume auf Messen)

3 Monate Garantie gegen auslaufen - ab Kaufdatum

Ersatz : defekte Einlagen einsenden mit Kaufbeleg

kein Rückgabe-Widerrufsrecht lt. BGB bei Messekäufen

Bedingungen bei Online Käufen - im Internet Shop

Widerrufsrecht innerh. von 14 Tagen schriftl. mit Brief nach Kaufabschluss . Die Ware muss ungebraucht -Verpackungen können geöffnet sein.

Bitte auch Geschäftsbedingungen auf www.medicovi.de beachten.

Medicovi Einlagen sind bei Arbeitsschuhen austauschbar. Unsere Einlagen wurden in Übereinstimmung mit dem med. Wissen des Laboratoriums für funktionelle Anatomie und Biomechanik Uni Kopenhagen entwickelt und im Zentrum der Uni Aalborg die Funktion der sensorischen Massage getestet. Medicovi - Einlagen werden seit über 20 Jahren in Dänemark hergestellt. Die Wirkung sensomotorischer Einlagen ist wissenschaftlich nachgewiesen.

Medicovi - IVG Handels, Messe GmbH Postfach 68 D - 87534 Oberstaufen

www.medicovi.de

medicovi-gesundheitsprodukte@gmx.de

Alle Geschäftsbedingungen im Internet ersichtlich - Prüfzeugnisse -Handbücher - usw.